



MILIEU DE TRANSPORT ET LYSE MTL02-AB69 APPOLON BIOTECK

PROTOCOLE D'UTILISATION

1. Prélèvements nasopharyngés :

- Immerger l'écouvillon dans le tube immédiatement après réalisation du prélèvement
- Tourner l'écouvillon afin de décharger le matériel biologique
- Retirer et jeter l'écouvillon et fermer soigneusement le tube

2. Prélèvements salivaires :

- Pipeter 50µl à 150µl de salive brute dans le tube
- Refermer soigneusement le tube

À réception au laboratoire :

- Agiter le tube pendant une minute (type « vortex » ou autre type d'agitateur vibrant). Laisser le tube sans agitation pendant 5 min.
- Répéter 2 fois ce processus d'agitation
- Pipeter 5 µL de lysat dans la réaction PCR.

Si les lysats ne sont pas utilisés immédiatement, il est conseillé de les stocker à 4°C avant l'utilisation.

205 rue des frères Lumière
69970 CHAPONNAY
FRANCE

+33 (0)4 37 57 00 54
contact@appolonbiotech.com

www.appolonbiotech.fr